

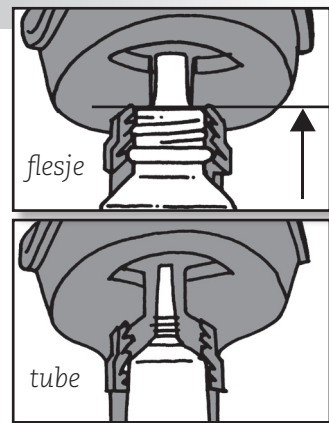
STAP 1

Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing en de bijsluiting van uw oogmedicatie zorgvuldig door.

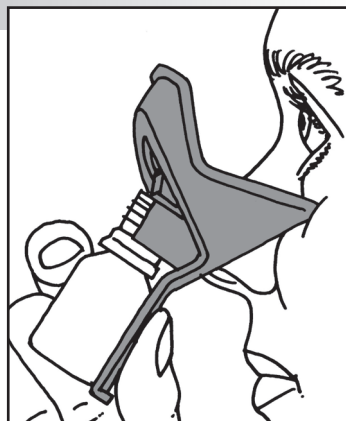
Was eerst uw handen en ga zitten op een stoel met een lage rugleuning.

**STAP 2**

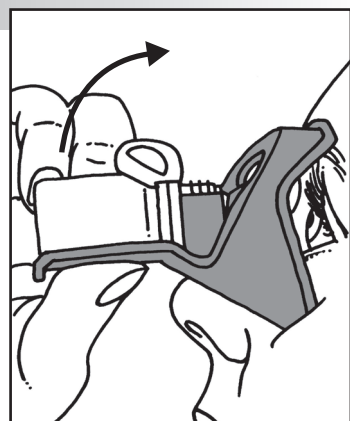
Draai het dopje van flesje/tube los. Schuif het flesje of de tube in de Eyot® zoals afgebeeld. Het druppel uiteinde dient volledig door de Eyot® gestoken te zijn.

**STAP 3**

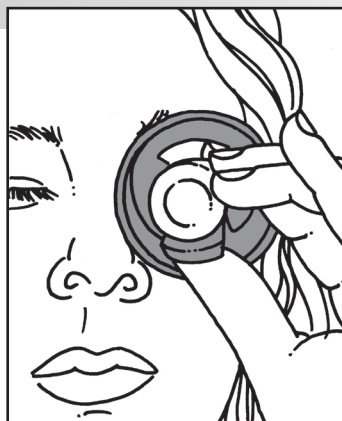
Plaats de Eyot® zoals afgebeeld, onder uw ooglid. Trek het ooglid met behulp van het hulpstuk voorzichtig naar beneden toe open totdat de Eyot® op het jukbeen steunt.

**STAP 4**

Plaats het bovenste gedeelte van de Eyot® op het voorhoofd of wenkbrauw.

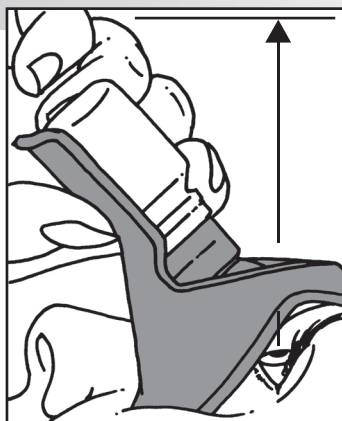
**STAP 5**

Buig het hoofd achterover en kijk door de kijkopening van de Eyot® naar het plafond loodrecht boven u (hierdoor brengt u het hoofd in de juiste stand om te druppelen).

**STAP 6**

Blijf naar het plafond kijken en knijp rustig in het flesje of de tube zoals afgebeeld tot er een druppel in het oog valt. Neem de Eyot® van het oog en druk, gedurende 1 à 2 minuten, licht met uw vinger in de ooghoek.

Neem het flesje of de tube uit de Eyot® en sluit deze af.



FABRIKANT EN DISTRIBUTEUR:
SPRUYT HILLEN
TINBERGENLAAN 1
3401 MT IJSSELSTEIN

ARTIKELNUMMER 6300

Eyot®

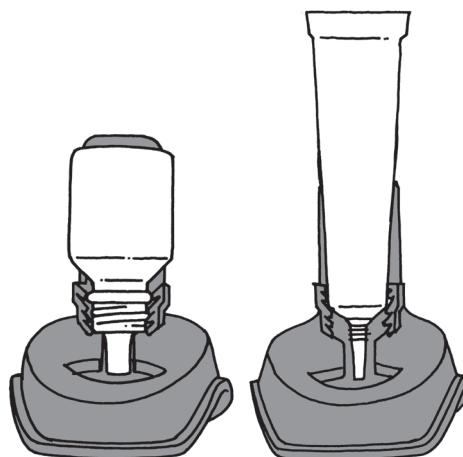
Gebruikersinstructie

HULPSTUK BIJ HET
INDRUPPELEN VAN UW OGEN

Versie mei 2015



EYOT® IS EEN GEREgistREERD HANDELSMERK.



OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

Eyot® is een universeel oogdruppelhulpstuk dat uitsluitend in combinatie met volledige indrukbare plastic oogdruppelflesjes en met plastic ooggeltubes gebruikt kan worden.

Oogdruppelflesjes van glas of van harde/stijve plastics en oogzalftubes niet in combinatie met de Eyot® gebruiken.

Gebruik alleen oogdruppelflesjes waarvan de lengte van de druppelaar tussen 8 en 14 millimeter is.

Eyot® voorziet uitsluitend in een andere druppeltechniek.

Eyot® is gemaakt van een recyclebare thermoplastische kunststof.

Eyot® voldoet aan de bepalingen van de Europese wetgeving Medische Hulpmiddelen, klasse I.

REINIGINGSADVIES

Droog reinigen: verwijder het oogdruppelflesje of tube uit de Eyot® en reinig het hulpstuk met een schone droge doek.

Nat reinigen: verwijder het oogdruppelflesje of tube uit de Eyot®. Spoel het hulpstuk met lauw warm water af.

Droog het met een schone doek. Gebruik geen heet of kokend water. Niet in de vaatwasser reinigen.

Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Houdt het voor eigen gebruik.

