



Für  
Augentropfen,  
Augensalben und  
Augengele

# **Eyot<sup>®</sup> – Tropfhilfe** Einfach und effektiv

# Was ist Eyot®?

Weitere Informationen finden Sie unter [www.eyot.nl](http://www.eyot.nl)

Eyot® ist eine Tropfhilfe für die richtige und sichere Anwendung eindrückbarer Augentropfenflaschen, Augensalben/-geltuben sowie für Einzeldosisverpackungen (EDO).




## Für wen ist Eyot® geeignet?

Eyot® ist für alle Patienten geeignet, die Augentropfen verwenden.


Erfahrungen zeigen, dass es oft schwierig ist, Augentropfen in das eigene Auge zu tropfen. Bei den meisten Patienten treten bei der Verabreichung von Augentropfen folgende Probleme auf:

- Nervosität bei der Verabreichung der Augentropfen
- Zittern der Hände
- Schwierigkeiten beim Zusammendrücken der Flasche
- Eingeschränktes Sehen
- Angst, dass die Flasche das Auge berührt
- Tropfen verfehlt das Auge aufgrund falscher Positionierung der Flasche

## Wie wende ich Eyot® an?

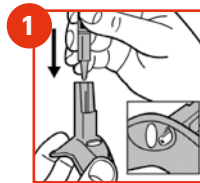

**1.** Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich auf einen Stuhl mit niedriger Rückenlehne. Öffnen Sie die Verpackung und stecken Sie die Flasche/Tube in das Eyot®/ Minim Eyot®.

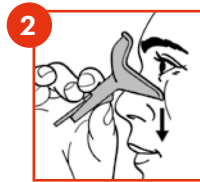

**2.** Setzen Sie Eyot®/ Minim Eyot® unter das Augenlid und ziehen Sie das Augenlid vorsichtig nach unten.



**3.** Setzen Sie den oberen Teil des Eyot®/ Minim Eyot® auf die Augenbraue.



**4.** Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten bis die Sichtöffnung des Eyot®/Minim Eyot® senkrecht über Ihnen ist. Ihr Kopf ist jetzt in der richtigen Position. Das Medikament kann nun ins Auge getropft werden.

## Vorteile von Eyot®:

- ✓ mit einer Hand bedienbar
- ✓ erleichtert die Verabreichung durch eine optimale Tropfposition
- ✓ für Sehbehinderte geeignet
- ✓ Verletzungsgefahr minimiert
- ✓ hygienische Anwendung der Augenmedikamente



# Eyot® für Augentropfen, Augensalben und Augengele

In zwei Varianten erhältlich:



**Eyot®**  
2.5 | 3 | 5 ml

- für Flaschen
  - für Tuben
- PZN: 16226025



**Minim Eyot®**

- für Einzeldosisverpackungen (EDO)
- PZN: 16226019

## Gemeinsam

gestalten wir die Zukunft  
personalisierter Medizin




**Fagron GmbH & Co. KG**  
Wilhelm-Bergner-Straße 11 g  
D-21509 Glinde

Tel.: +49 (0) 40 – 670 67 5  
Mail: [info@fagron.de](mailto:info@fagron.de)  
Web: [fagron.de](http://fagron.de)

**Fagron**  
personalizing  
medicine

# Minim Eyot®


## APPLIKATIONSHILFE FÜR AUGENTROPFEN IN EINZELDOSAEN

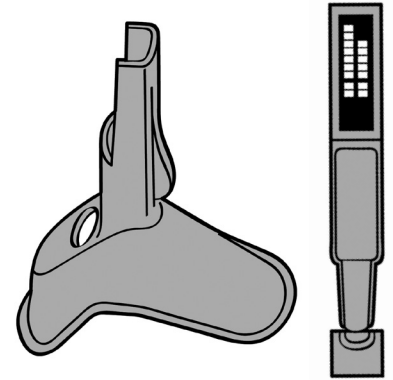

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Hilfsmittel verwenden.


Das Minim Eyot® ist ein Hilfsmittel für die Applikation von Augentropfen in Einzeldosen (EDO).

Waschen Sie zuerst Ihre Hände und setzen Sie sich auf einen Stuhl mit niedriger Rückenlehne.

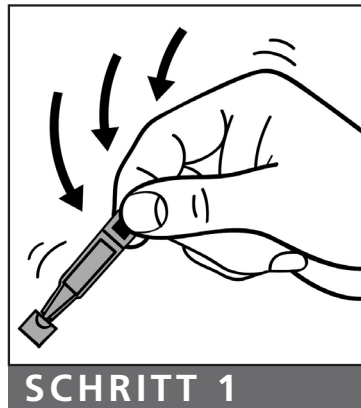


**SCHRITT 1**

Schütteln Sie das Einzeldosenbehältnis, sofern es sich um ein Gel handelt, damit sich keine Luft vor dem Tropfer befindet.

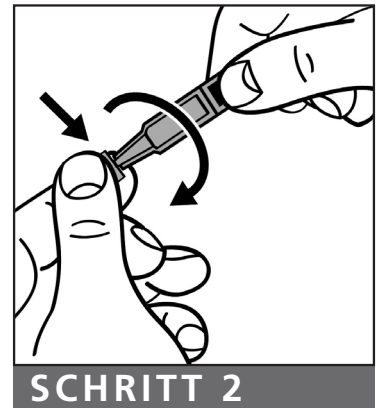

**SCHRITT 2**

Schrauben Sie die Kappe des Einzeldosenbehältnisses ab.

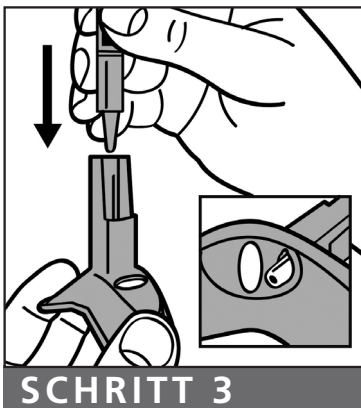


**SCHRITT 3**

Stecken Sie das Einzeldosenbehältnis wie abgebildet in die Tropfhilfe und drücken Sie dieses fest. Die Öffnung des Einzeldosenbehältnisses muss vollständig durch die Tropfhilfe gesteckt sein. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Spender richtig sitzt.



**SCHRITT 4**


Halten Sie den Minim Eyot® wie abgebildet. Das geöffnete Auge befindet sich über der Sichtöffnung. Ziehen Sie das untere Augenlid mit der Tropfhilfe leicht nach unten.

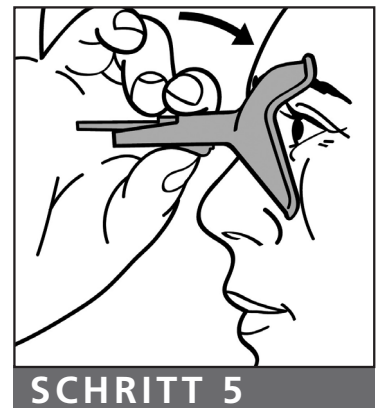

**SCHRITT 5**

Legen Sie den oberen Teil der Tropfhilfe auf Ihre Stirn oder Augenbraue.



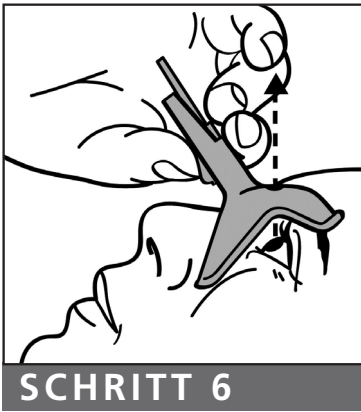

### SCHRITT 6

Beugen Sie Ihren Kopf zurück und schauen Sie durch die Sichtöffnung der Tropfhilfe zur Decke senkrecht nach oben. Diese Haltung bringt den Kopf in die richtige Position, um den Tropfen exakt zu platzieren.



### SCHRITT 7

Schauen Sie weiter zur Decke und drücken Sie die Tropfhilfe vorsichtig mit Daumen, Zeigefinger sowie Mittelfinger zusammen, bis ein Tropfen in das Auge gelangt. Entfernen Sie die Tropfhilfe und drücken Sie leicht mit einem Finger für 1 bis 2 Minuten in den Augenwinkel.



### SCHRITT 8

Sobald das Einzeldosenbehältnis leer ist entnehmen Sie dieses aus der Tropfhilfe und werfen Sie es weg.

### REINIGUNGSHINWEISE

*Trockenreinigung:* Nehmen Sie das Einzeldosenbehältnis aus der Tropfhilfe und reinigen Sie die Tropfhilfe mit einem sauberen, trockenen Tuch.

*Nassreinigung:* Entfernen Sie das Einzeldosenbehältnis von der Tropfhilfe. Spülen Sie den Aufsatz mit warmem Wasser. Trocknen Sie den Aufsatz mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie kein heißes oder kochendes Wasser. Reinigen Sie die Tropfhilfe nicht in der Spülmaschine.

### WEITERE INFORMATIONEN

Der Minim Eyot® ist ein Hilfsmittel, das nur in Kombination mit Augentropfen verwendet werden kann, die in einem geschlossenen Spender (Einzeldosenbehältnis) verpackt sind. Der Minim Eyot® besteht aus recycelbarem, thermoplastischem Kunststoff. Der Minim Eyot® entspricht den Bestimmungen der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte der Klasse I.

### WARNUNG

Drücken Sie das Einzeldosenbehältnis vor jedem Gebrauch fest in die Tropfhilfe, bis das Tropfende durch die Tropfhilfe ragt. Dies verhindert, dass der Tropfen aus dem Spender versehentlich auf die Tropfhilfe trifft.

### ADRESSEN

Hersteller: Spruyt hillen BV, Tinbergenlaan 1, 3401 mt IJsselstein, The Netherlands, tel +32 (0) 30-2814411.

Distribution: Fagron GmbH & Co. KG, Wilhelm-Bergner-Str. 11 g, 21509 Glinde, Tel.: +49 (0) 40 670 67 5

Eyot® ist eine registrierte Schutzmarke.

