



Für
Augentropfen,
Augensalben und
Augengele

Eyot[®] – Tropfhilfe Einfach und effektiv

Was ist Eyot®?

Weitere Informationen finden Sie unter www.eyot.nl

Eyot® ist eine Tropfhilfe für die richtige und sichere Anwendung eindrückbarer Augentropfenflaschen, Augensalben/-geltuben sowie für Einzeldosisverpackungen (EDO).




Für wen ist Eyot® geeignet?

Eyot® ist für alle Patienten geeignet, die Augentropfen verwenden.


Erfahrungen zeigen, dass es oft schwierig ist, Augentropfen in das eigene Auge zu tropfen. Bei den meisten Patienten treten bei der Verabreichung von Augentropfen folgende Probleme auf:

- Nervosität bei der Verabreichung der Augentropfen
- Zittern der Hände
- Schwierigkeiten beim Zusammendrücken der Flasche
- Eingeschränktes Sehen
- Angst, dass die Flasche das Auge berührt
- Tropfen verfehlt das Auge aufgrund falscher Positionierung der Flasche

Wie wende ich Eyot® an?

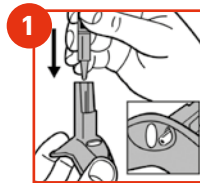

1. Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich auf einen Stuhl mit niedriger Rückenlehne. Öffnen Sie die Verpackung und stecken Sie die Flasche/Tube in das Eyot®/ Minim Eyot®.

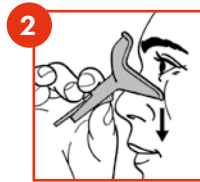

2. Setzen Sie Eyot®/ Minim Eyot® unter das Augenlid und ziehen Sie das Augenlid vorsichtig nach unten.



3. Setzen Sie den oberen Teil des Eyot®/ Minim Eyot® auf die Augenbraue.



4. Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten bis die Sichtöffnung des Eyot®/Minim Eyot® senkrecht über Ihnen ist. Ihr Kopf ist jetzt in der richtigen Position. Das Medikament kann nun ins Auge getropft werden.

Vorteile von Eyot®:

- ✓ mit einer Hand bedienbar
- ✓ erleichtert die Verabreichung durch eine optimale Tropfposition
- ✓ für Sehbehinderte geeignet
- ✓ Verletzungsgefahr minimiert
- ✓ hygienische Anwendung der Augenmedikamente



Eyot® für Augentropfen, Augensalben und Augengele

In zwei Varianten erhältlich:



Eyot®
2,5 | 3 | 5 ml

- für Flaschen
 - für Tuben
- PZN: 16226025



Minim Eyot®

- für Einzeldosisverpackungen (EDO)
- PZN: 16226019

Gemeinsam

gestalten wir die Zukunft
personalisierter Medizin



Fagron GmbH & Co. KG
Wilhelm-Bergner-Straße 11 g
D-21509 Glinde

Tel.: +49 (0) 40 – 670 67 5
Mail: info@fagron.de
Web: fagron.de

Fagron
personalizing
medicine

HERSTELLER:
SPRUYT HILLEN
TINBERGENLAAN 1
3401 MT IJSSELSTEIN
THE NETHERLANDS


DISTRIBUTION:
FAGRON GMBH & CO.KG
WILHELM-BERGNER-STR. 11 G
21509 GLINDE
TEL.: +49 (0) 40 670 67 5

Benutzeranweisung für das Eyot®

Version Mai 2015



EYOT® IST EINE REGISTRIERTE SCHUTZMARKE.

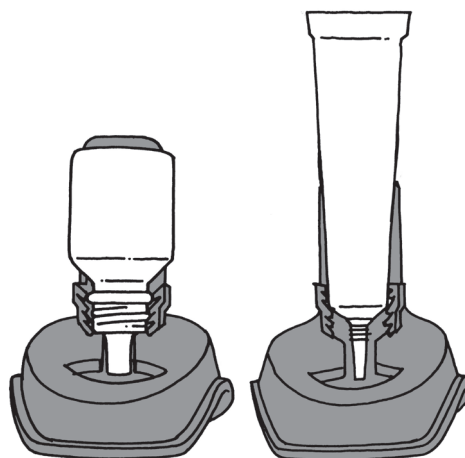

WEITERE PRODUKTANGABEN

Das Eyot® ist ein universelles Hilfsmittel für das Anwenden von Augentropfen, das ausschließlich in Verbindung mit eindrückbaren Augentropfenfläschchen aus Plastik verwendet werden kann. Augentropfenfläschchen aus Glas oder aus Hartplastik nicht mit dem Eyot® anwenden.


Verwenden Sie bei dem Eyot® nur Augentropfenfläschchen, deren Flaschenspitze zwischen 8 und 14 Millimeter lang ist.

Eyot® ist aus wiederverwendbarem, thermoplastischem Kunststoff hergestellt. Eyot® kann nur als eine mögliche Hilfstechnik zum Tropfen angewendet werden.

Eyot® entspricht der EC-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte der Klasse 1.

REINIGUNG

Nach dem Gebrauch das Eyot® sofort mit kaltem Wasser reinigen und mit einem sauberen Tuch trocknen; staubfrei aufbewahren. Das Eyot® nicht auskochen, nicht in der Spülmaschine reinigen und nicht für andere Zwecke verwenden. Bitte aus hygienischen Gründen nicht von anderen Anwendern mitbenutzen lassen.

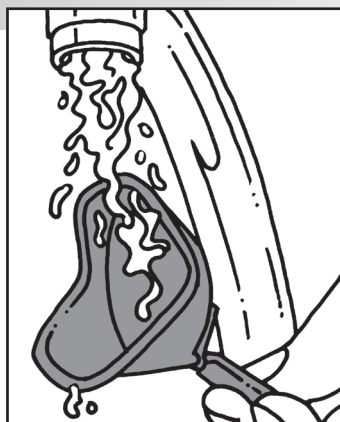


SCHRITT 1

Waschen Sie Ihre Hände und setzen Sie sich in einen Stuhl mit einer nicht zu hohen Rückenlehne. Lesen Sie diesen Beipackzettel komplett durch.




SCHRITT 2

Drehen Sie den Verschluss von dem Fläschchen/der Tube. Schieben Sie das Fläschchen/die Tube in das Eyot®. Stecken Sie die Flaschenspitze/Tubenspitze ganz durch das Eyot®.

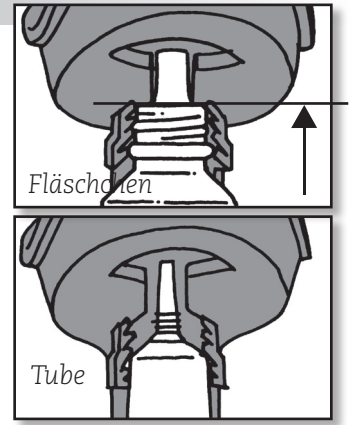


SCHRITT 3

Setzen Sie das Eyot® unter das Augenlid und ziehen Sie mit dem Eyot® das Augenlid vorsichtig nach unten, so dass das Eyot® auf dem Jochbein ruht.

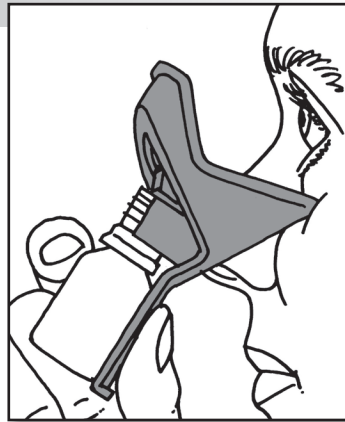


SCHRITT 4

Positionieren Sie das Eyot® auf Ihrer Augenbraue. Die Flaschenspitze/Tubenspitze befindet sich jetzt genau vor Ihrem Auge.

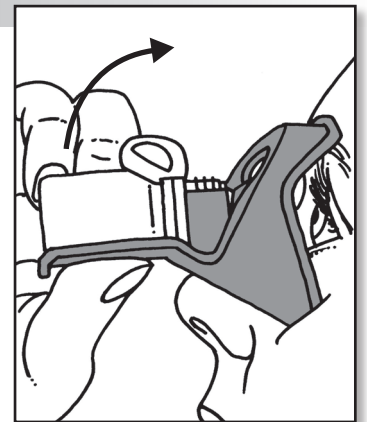

SCHRITT 5

Beugen Sie den Nacken nach hinten und schauen Sie durch die Öffnung, bis Sie die Decke senkrecht über sich sehen.

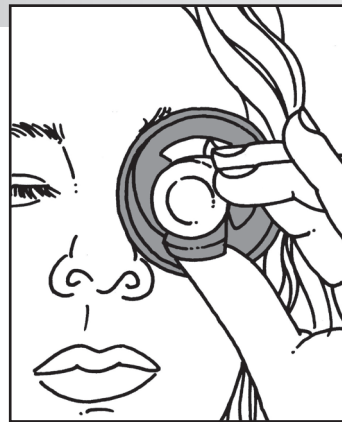

SCHRITT 6

Tropfen Sie in das Auge, in dem Sie auf das Fläschchen/Tube drücken.

Nehmen Sie das Fläschchen/die Tube aus dem Eyot® und drehen Sie den Verschluss wieder auf das Fläschchen/die Tube.

